


# VitaWin® 3.4

## Die Auswertesoftware für VitaGuard®-Vitalfunktionsmonitore

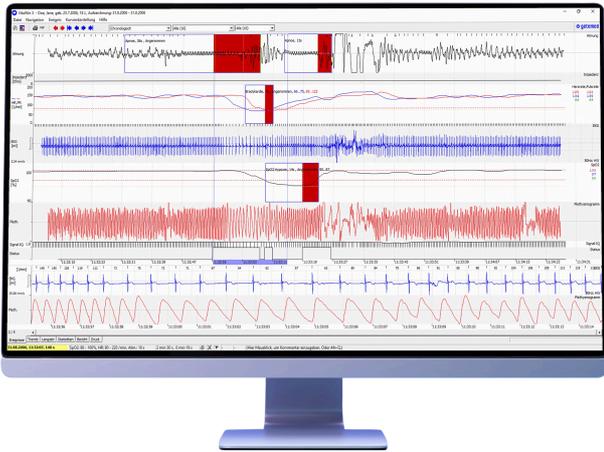

### Die wichtigsten Eigenschaften

#### Datenmanagement

- Übersichtliche Patienten- und Datenverwaltung
- Monitorparameter einstellen und Patientendaten herunterladen

#### Analysewerkzeuge

- Suchfunktionen nach Art und Schweregrad
- Umfangreiche Zoomfunktionen
- Export für weitere Datenanalyse herunterladen

#### Anzeige und Überwachung

- Umfassende Darstellungsoptionen
- Anzeige von Kurvenverläufen für EKG, Herzrate, Atmungskurve, Atmungsrate, Grundimpedanz, SpO<sub>2</sub>, Pulsrate, Signal-IQ, Plethysmogramm, Perfusionsindex, Statusinformationen

Einfach zu bedienen, zuverlässig, schnell und übersichtlich – das sind die Merkmale einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Auswertungssoftware. Mit konfigurierbaren und umfassenden Anzeigeoptionen für die grafische Darstellung der physiologischen Parameter und Kurvenverläufe, einer übersichtlichen Datenbankverwaltung sowie einer einfachen und intuitiven Bedienung erfüllt die Auswertungssoftware VitaWin® 3.4 all diese Anforderungen.

#### Leistungsstarke Auswertung

Durch einen workflow-gesteuerten Betrieb unterstützt VitaWin® das medizinische Fachpersonal bei der Auswertung der von den VitaGuard®-Vitalfunktionsmonitoren gespeicherten Alarmereignisse und Daten. Suchfunktionen zum Auffinden kritischer Ereignisse sowie Hotkeys helfen dem Anwender, sich schnell einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Ereignisse von besonderem Interesse können für andere Fachkollegen gekennzeichnet werden, wodurch Zeit gespart und der Arbeitsablauf durch die Auswertung optimiert wird.

#### Vielseitige Grafiken

Die Datensätze der Monitore werden in drei Register unterteilt und grafisch dargestellt: Ereignis, Trend und Langzeit. Das Ereignisregister zeigt die einzelnen Alarmereignisse zusammen mit den jeweiligen Vor- und Nachbetrachtungszeiten an. Die Ereignisse können chronologisch, nach Schweregrad oder einfach nach Typ angezeigt werden. Das Langzeitregister zeigt alle Kurven an, einschließlich EKG, Atmung und Plethysmogramm, die kontinuierlich vom Monitor aufgezeichnet wurden.

In ähnlicher Weise zeigt das Trendregister alle Trenddaten wie Herzrate und Pulsrate, SpO<sub>2</sub>, Perfusionsindex usw. an, die in den letzten 6 Tagen aufgezeichnet wurden. Je nach Monitortyp können diese Aufzeichnungen erheblich länger sein. Im Statistikregister werden die Alarmereignisse in die Gruppen Herzrate, Apnoe oder Sauerstoffsättigung sortiert und die Ergebnisse als Grafiken und Tabellen dargestellt. Die Berichts- und Druckregister ermöglichen es dem Anwender, umfassende Berichte und Ausdrücke für Dokumentationszwecke zu erstellen.

#### Protokolle und Vernetzung

Die Patienten- und Geräteprotokolle dokumentieren alle Änderungen an den Monitoreinstellungen und registrieren, wie oft die Geräte verwendet wurden. Damit liefern sie wichtige Informationen zur Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich der Gerätebedienung – sowohl in der Klinik als auch zu Hause. VitaWin® kann so konfiguriert werden, dass alle Patientendaten und Aufzeichnungen auf einem zentralen Server gespeichert werden.

# VitaWin® 3.4

## Technische Daten

### Datentransfer vom VitaGuard® VG 5

Herunterladen der Daten auf einen USB-Stick

#### Schritte zum Herunterladen


1. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-C-Anschluss des Monitors an.
2. Gehen Sie zu: Startseite → Speicher → USB-Speicher 
3. Drücken Sie „Start“, um mit dem Kopieren der Dateien zu beginnen.

#### Ergebnisse

Positive Meldung:

- Zeigt die Anzahl der kopierten Dateien an.
- Bestätigt mit der Meldung „100 % abgeschlossen“.

Hinweis: Sie können den Übertragungsvorgang jederzeit beenden, indem Sie im Dialogfeld auf „Abbrechen“ tippen.

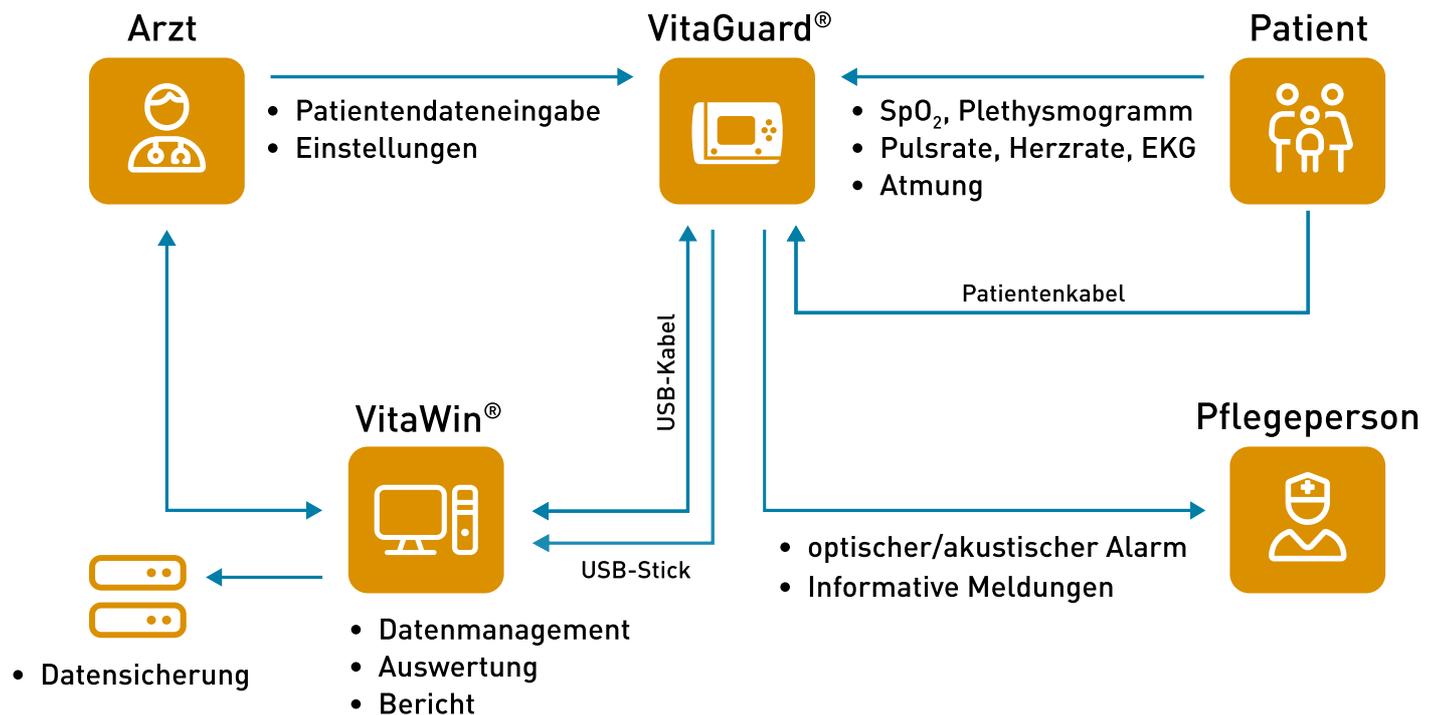

#### Kompatible VitaGuard Monitore

VitaGuard® VG 5 MP, VG 5 CR, VG 5 PX  
VitaGuard® VG 3100, VG 2100, VG 310

#### Anleitungen und Tutorials

Scannen Sie den QR-Code, um hilfreiche Anleitungen und praktische Tipps und Tricks zu entdecken.



**Erleben Sie den Unterschied –  
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.**

Vorgesehene Anwender:  
Medizinisches Fachpersonal und geschulte autorisierte Händler.  
Nicht für Eltern oder Patienten bestimmt.  
Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.



**GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG**

Oderstr. 77 / 14513 Teltow / Germany

T: +49 3328 3942-0

F: +49 3328 3942-99

E: info@getemed.de

W: www.getemed.de